

Link do produktu: <https://golebiswiat.com.pl/simcro-standard-0-5-ml-strzykawka-automatyczna-z-mocowaniem-butelki-p-421.html>



SIMCRO Standard 0,5 ml STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA Z MOCOWANIEM BUTELKI

Cena	134,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	9418081
Kod EAN	9418081101669
Producent	Pozostałe

Opis produktu

SIMCRO Standard 0,5 ml

STRZYKAWKA AUTOMATYCZNA Z MOCOWANIEM BUTELKI

OPIS PRODUKTU

- Odporna i ergonomiczna konstrukcja.
- Łatwe mocowanie i usuwanie igieł.
- Wygodne pokrętko umożliwiające ustawienie dawki – z możliwością regulacji w zakresie od 0,1 ml do 0,5 ml (co 0,1 ml).
- Możliwość ustawienia cylindra z mocowaniem na butelkę pod dowolnym kątem.
- Złącze Luer-Lock umożliwia dopasowanie wszystkich dostępnych na rynku igieł.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

STOSOWANIE

1. Umieść nasadkę igły w złączu Luer-Lock, a następnie przekręć igłę zgodnie ze wskazówkami zegara.
2. Zdejmij nasadkę zabezpieczającą mocowanie na butelkę.
3. Nasuń nasadkę na butelkę ze szczepionką.
4. Za pomocą kolca delikatnie przekłuj butelkę ze szczepionką, a następnie dokręć nasadkę do aplikatora na butelkę.
5. Za pomocą pokrętkła nastawienia dawki ustaw dawkę maksymalną.

NAPEŁNIANIE

1. Urządzenie trzymaj w takiej pozycji, aby igła skierowana była ku górze.
2. Ściskaj i zwalnij uchwyt tak długo, aż cylinder zostanie wypełniony produktem i wszystkie pęcherzyki powietrza zostaną usunięte.
3. Za pomocą pokrętkła nastawienia dawki, ustaw pożądaną dawkę (UWAGA: żadaną dawkę wskazuje przednia część tłoka, a nie czerwona uszczelka o-ring!).

CZYSZCZENIE

-
1. Zanim przystąpisz do czyszczenia automatu, igłę oraz pozostałą w cylindrze część szczepionki usuń do oddzielnego naczynia przeznaczonego na odpady.
 2. Wymieszaj ciepłą wodę z detergentem.
 3. Zanurz urządzenie w wodzie z detergentem, a następnie kilkakrotnie i energicznie ściśnij uchwyty by przepłukać automat.
 4. Powtórz czynność w czystej ciepłej wodzie bez detergentu.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

1. Odkręć pierścień znajdujący się między uchwytami a cylindrem.
2. Wyjmij cylinder, a następnie nasmaruj uszczelkę o-ring olejem roślinnym (NIE UŻYWAJ OLEJÓW MINERALNYCH).
3. Ponownie zmontuj automat.
4. Urządzenie przechowuj w suchym i ciemnym miejscu.

W zestawie znajdują się 3 igły wielorazowego użytku 0.8x10 mm

PRODUCENT

DATAMARS Group USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Europa

